



# DepiBlend

DEPILACIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL

*La única depilación verdaderamente definitiva*

---

## DepiBlend

---

DepiBlend es el equipo de **depilación eléctrica con aguja** de Unión Láser. Combina automáticamente dos corrientes —termólisis y electrólisis— en el sistema **blend**, logrando la eliminación definitiva del vello con máxima eficacia y seguridad para el profesional.

En un mercado dominado por la tecnología láser e IPL, la depilación eléctrica sigue siendo **la única técnica reconocida como verdaderamente definitiva**. Con una correcta canalización, la coagulación del folículo es completa: ese pelo no vuelve a salir.

### Sistema Blend: doble acción simultánea

**1. Termólisis** — La corriente de alta frecuencia (alterna, elevada tensión, baja intensidad) genera un arco voltaico que produce electrocoagulación. Eleva la temperatura de la zona y provoca la pérdida de plasma sanguíneo, preparando el folículo para la segunda fase.

**2. Electrólisis** — La corriente galvánica (continua, bajo voltaje, intensidad constante) produce reacciones electrolíticas: los iones se atraen y repelen generando sustancias ácidas y alcalinas cauterizantes que destruyen las células germinales del pelo.

La combinación automática de ambas corrientes es lo que hace al sistema blend significativamente más efectivo que cada técnica por separado.

---

## ¿Por qué depilación eléctrica?

---

Existen situaciones clínicas donde el láser y la IPL no son la solución:

- ✓ **Canas y vello claro** — No existe tecnología de luz capaz de eliminar pelos sin melanina.
- ✓ **Vello facial incipiente** — El láser/IPL puede generar efecto paradójico (efecto invernadero), estimulando el crecimiento.
- ✓ **Vello residual post-láser/IPL** — El complemento perfecto para lograr un resultado 100% limpio.
- ✓ **Zonas delicadas** — Precisión pelo a pelo, ideal para cejas, labio superior y mentón.

---

## Protocolo de tratamiento

---

El cliente debe estar informado del proceso. Una vez iniciado el tratamiento de depilación eléctrica, debe suspenderse la depilación con pinza o cera. Se recomienda repetir el tratamiento de forma frecuente, sin dejar que el pelo adquiera su largo terminal, para tratarlo en fase de crecimiento adecuada.

### Efectividad

La destrucción del folículo es permanente con una correcta canalización de la aguja.

### Indoloro

La combinación blend minimiza las molestias frente a la termólisis o electrólisis aisladas.

### Seguridad

Equipo diseñado para uso exclusivo por profesionales de la estética titulados.

### Versatilidad

Aplicable en cualquier tipo de vello (grueso, fino, claro, oscuro) y cualquier fototipo.

---

## Contraindicaciones

---

Este equipo está fabricado para uso exclusivo por profesionales de la estética. Su aplicación se realizará sobre personas adultas con piel sana. Queda contraindicada la depilación eléctrica en:

- Portadores de dispositivos electrónicos
- Acné evolutivo
- Zonas inflamadas
- Erosiones, fisuras, heridas y herpes
- Capilares dilatados (telangiectasias)
- Línea de las pestañas
- Nevus
- Mucosas

---

## Accesorios incluidos

---

- ✓ Mango portaaguja
- ✓ Electrodo masa
- ✓ Cable masa
- ✓ Pedal de accionamiento
- ✓ Caja de agujas de un solo uso (cabezal K)
- ✓ Cable de alimentación





## **Unión Láser**

Aparatología Estética

C/ Río Tiétar, 11 · 28110 Algete (Madrid)

[www.unionlaser.es](http://www.unionlaser.es)

[info@unionlaser.es](mailto:info@unionlaser.es)

647 50 56 22

DISTRIBUIDO POR: